



ARÂCHES
LA FRASSE | STATIONS
des CARROZ
& de FLAINE

MASQUE DE PROTECTION

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Votre masque assure une filtration des particules émises supérieure à 70%. Ce modèle a été mesuré à 83% avant lavage, 96% après 10 lavages. Sa respirabilité permet son port pendant un temps maximum de **4 heures**. Il est réutilisable car lavable **10 fois**.

Ce masque est fabriqué avec deux couches de tissu 74% polyester, 26% coton selon les spécifications du guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020.

COMMENT LE PORTER ?



Votre masque doit :
- monter sur votre nez
- couvrir votre menton
- être serré sur votre visage



Ne pas le porter en dessous de votre nez.



Ne pas laisser votre menton exposé.



Ne pas le porter sans le serrer.



Ne pas couvrir que le bout de votre nez.



Ne pas mettre son masque sous son menton.

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

⚠️ LAVER VOTRE MASQUE AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION.

Après utilisation, votre masque doit être isolé soit pour être jeté, soit pour être lavé.

Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver (dans ce cas, le sac et le masque peuvent être lavés ensemble, en sortant au préalable le masque du sac). **Votre masque doit être lavé en machine avec un cycle à 60° de 30 minutes minimum.** Il est de plus recommandé de le faire sécher au sèche-linge, puis de le repasser à une température de 120 à 130°.

Il doit ensuite être stocké de manière à préserver la propreté.

ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières.

Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.



Lavez-vous très régulièrement les mains



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir



Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le



Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades



Respecter une distance de 1 mètre